

Denseo® OxyBond

Metal seramik kaplamalarının basınç dayanımı çekme dayanımından daha fazladır. CTE deki olası farklılıkları telafi edebilmek, metal ile seramiği birbirine sağlam ve güvenli bağlayarak çatlak ve atmaların önüne geçmek için Denseo OxyBond'u üretti. Metal altyapılarınız ile kaplama malzemeleriniz arasında en güçlü ve sorunsuz bağlayıcılık için en güvenilir çözüm. Denseo OxyBond metal altyapı ve kaplama arasında güvenli bir bağlantı sağlar.

Kullanım Talimatı

Metal yüzeyde gerekli bağlanmayı sağlamak için 3-4 bar'da kullandığınız metale göre 110 - 250 µm alüminyum oksit ile kumlayın.

ZAMAN

Denseo OxyBond size çok fazla zaman ve malden tasarruf ettirir.

Oksit ve wash opak pişimi gerekli değildir.



RİSKLERİ ÖNLER

Denseo OxyBond, CTE'deki olası farklılıkları telafi eder ve böylece çatlakları ve atmaları önler.

Homojen yayılan kristaller ideal bağlanmayı sağlar.

Yüksek maliyetli düzeltmeler ve tekrar üretimlerin önüne geçer.

Denseo OxyBond, vaat ettiği şeyi kesinlikle yerine getirir.

Güvenilir Sağlamlık

1. Azaltılmış pişim gereksinimleri sayesinde Zaman tasarrufu sağlar.
2. Metal ve kaplama arasında ideal bağlanma sağlar
3. En yüksek estetik talepleri karşılar



Metal üzerindeki büyütülmüş Oxy Bond etkisi




DOĞRU RENK

Denseo OxyBond, estetik açıdan zorlu bir kaplama için her diş rengine doğru temeli sağlar.



Kumlama

Metal yüzeyde gerekli başlanmayı sağlamak için 3-4 bar'da kullandığınız metale göre 110 - 250 µm alüminyum oksit ile kumlayın.

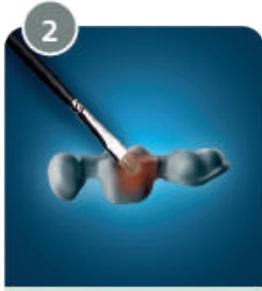

OxyBond uygulayın

OxyBond'u eşit miktarda, çok ince bir şekilde uygulayın. Kuron içi ve kole kenarlarına malzeme gelmesinden kaçının.



Fırınlama

Fırına bağlı olarak, belirtilen değerler farklılık gösterebilir. Pişim tablosunu takip ediniz. Başlangıç ısısı: **500°C**
Kurutma süresi: **4 dk**
Isı artışı: **60-70 °C**
Yüksek ısı : **980°C**
Yüksek ısıda bekletme: **1 dk**
Vakum başlangıç: **500°C**
Vakum bitiş: **979°C**



Opak

Opakınızı kullandığınız ürün talimatına uygun olarak uygulayın.



Bitim

Seramik kaplaması için üreticinin talimatlarını uygulayın.

Detaylı bilgi, Görselli ve Videolu anlatım için " www.erkdental.com " Web Sitemizi Ziyaret Edebilirsiniz...



Denseo GmbH
Stengerstraße 9
63741 Aschaffenburg
Deutschland


Telefon: +49 6021 45106-0
Telefax: +49 6021 45106-29
E-Mail: info@denseo.de
Internet: www.denseo.de

İthalatçı Firma



Meriç Mh. Sanat Cd. No:18
Çamdıbi 35090 İzmir TÜRKİYE

+90 544 670 47 74 (Ürün Danışmanı)
+90 232 458 20 55 (pbx)
+90 232 458 20 65
www.erkdental.com
erkdental

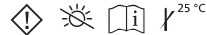

Nemden koryunuz



Steril değildir



Atmayınız kırılabilir



Sadece ehil kişiler tarafından dental amaçlı kullanım için üretilmiştir